

OPTICIT®

REF 331170



- ▶ Desinfectante (en polvo) a base de Carcoat (60,0 %)
- ▶ Fácil de usar mezclándolo con agua para crear una solución lista para usar
- ▶ Para la preparación, limpie la cánula traqueal con **OPTIBRUSH® CLEAN** según las instrucciones
- ▶ La solución desinfectante **OPTICIT®** (3 %) utilizada, lista para usar, es bactericida (incl. SARM), levuricida, fungicida, tuberculocida, micobactericida, viricida (virus con envoltura como VHB, VHC, VIH, coronavirus), actúa contra virus sin envoltura como norovirus, adenovirus y virus de la poliomielitis y es esporicida (*C. difficile*):
 - Bacterias y *Candida albicans* según EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 (carga reducida): al 1,0 % durante 10 min.
 - Bacilos tuberculosos (*M. terrae*) según EN 14348 y EN 14563 (carga reducida): al 2,0 % durante 30 min.
 - Virus (virus con envoltura como VHB, VHC, VIH, coronavirus) y virus sin envoltura (norovirus, adenovirus y virus de la poliomielitis) según EN 14476 y EN 17111 (carga reducida): al 1,0 % durante 10 min.
 - Hongos (*A. brasiliensis*) según EN 13624, EN 14562 (carga reducida): al 3,0 % durante 30 min.
 - Micobacterias (*M. avium*) según EN 14348 y EN 14563 (carga reducida): al 3,0 % durante 30 min.
 - Esporas (*C. difficile*) según EN 17126 (carga reducida): al 2 % durante 30 min.

Desinfectantes**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

OPTICIT® 100 g	REF 331170
1 polvo desinfectante (100 g)	
1 cuchara medidora	
1 instrucciones de uso	

Opcional:

OPTIBRUSH® CLEAN	100 g	REF 331110
	400 g	REF 331100


OPTIBRUSH® CONT		
Bote de limpieza	Normal	REF 31200
	XL	REF 31300

OPTIBRUSH®		
Cepillo de limpieza	Normal	REF 31850
	Plus	REF 31855


OPTIBRUSH® SWABS	Normal	REF 31910
	XL	REF 31920
	XL 25 cm	REF 31925

CE 0124

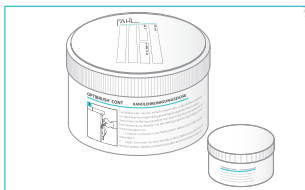

OPTICIT®**Uso**


Adopte medidas de higiene. Prepare los productos de limpieza y los accesorios. Prepare agua tibia (de calidad potable).

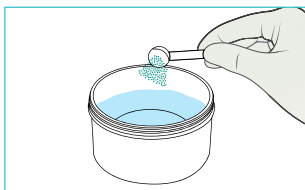


Mezcle 2 cucharas medidoras ligeramente colmadas de **OPTIBRUSH® CLEAN** con 500 ml de agua para preparar una solución limpiadora.



Enjuague tanto la cánula exterior como la interior con agua limpia tibia.

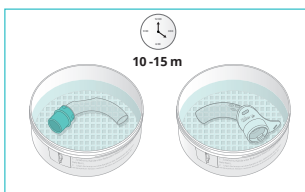

Introduzca la cánula exterior e interior en el bote de limpieza de cánulas con la solución de limpieza tibia preparada. El tiempo de aplicación es de entre 10 y 15 minutos.

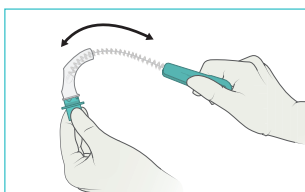


La cánula traqueal se limpia con el cepillo de limpieza desde la punta hasta el escudo con un movimiento uniforme de avance y retroceso.




Vuelva a enjuagar tanto la cánula exterior como la interior con agua limpia tibia.




Limpie el bote de limpieza de cánulas. Prepare el desinfectante y los accesorios. Prepare agua tibia (de calidad potable).

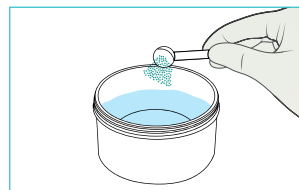


Mezcle 6 cucharas medidoras ligeramente colmadas de **OPTICIT®** con 500 ml de agua para preparar una solución desinfectante.

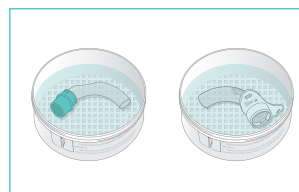


Introduzca la cánula exterior e interior en el bote de limpieza de cánulas con la solución desinfectante preparada. En función del espectro de acción, el tiempo de aplicación será de hasta 30 minutos.

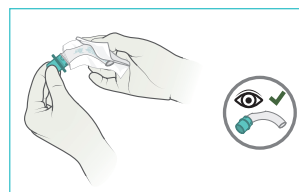

Finalmente, enjuague tanto la cánula exterior como la interior con agua limpia tibia. Revise la integridad de la cánula exterior y de la cánula interior. Humedezca la cánula interna con aceite para estoma.

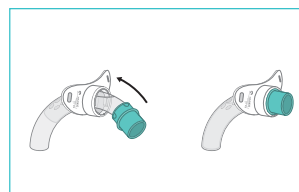

Monte la cánula. Para ello, avance la cánula interior en la exterior hasta que se pueda fijar.

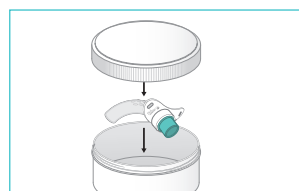

Coloque la cánula traqueal completa en la caja prevista para su almacenamiento.